



1 Die Fenster im Klassenzimmer werden geöffnet, da für den Test die Masken abgenommen werden müssen.

2 Deine Lehrkraft bereitet dein Teströhrchen vor. Sie stellt die Teströhrchen der ganzen Klasse/Klassengruppe in die Arbeitsstation und tropft 10 Tropfen der Pufferlösung in jedes Röhrchen.

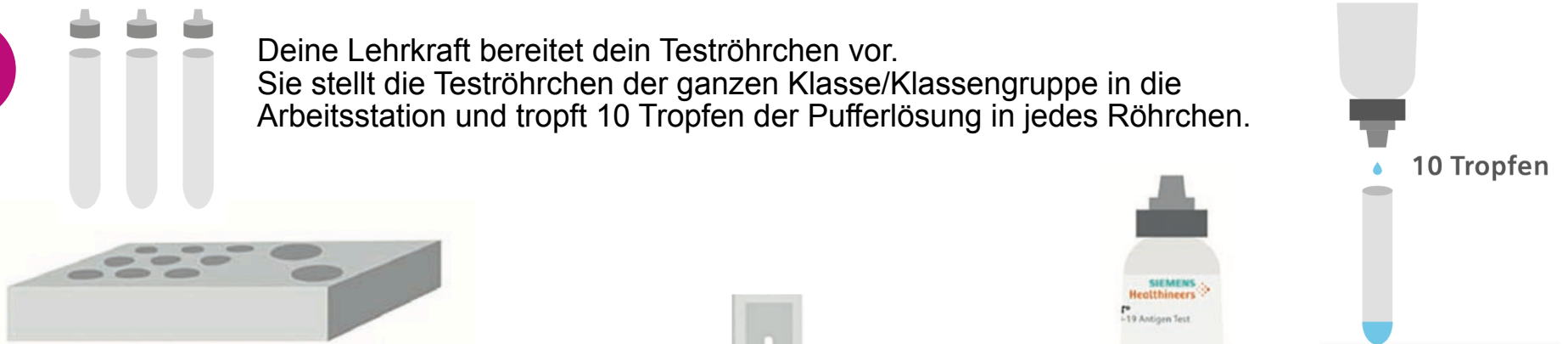


3 Du bekommst nun einen sterilen Tupfer und eine Testkassette von deiner Lehrkraft. Nimm die Testkassette aus dem Beutel und lege sie auf eine flache, saubere Fläche.

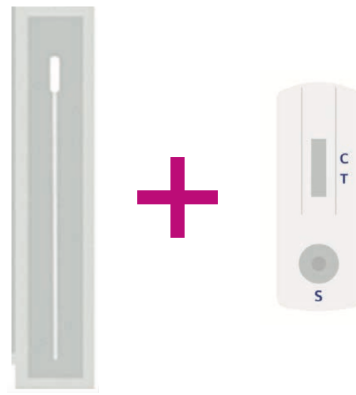


4 Öffne die Tupferpackung an der angegebenen Stelle. Zieh den Tupfer an seinem Kunststoffende aus der Verpackung. Berühre dabei NICHT die saugfähige Tupferspitze.

Leg die Verpackung des Tupfers so auf den Tisch, so dass du darauf später den benutzten Tupfer ablegen kannst.


Halt den Tupfer hoch. Das ist das Zeichen für deine Lehrkraft, dass sie beginnen kann, die Teströhrchen auszuteilen. Nimm das Teströhrchen in deine freie Hand.

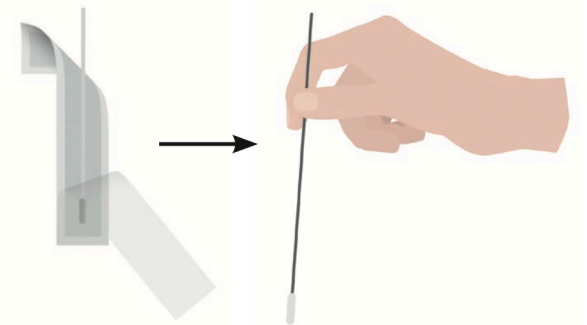


5 **Nimm erst jetzt deine Maske ab.** Führe die saugfähige Spitze des Tupfers vorsichtig in dein linkes Nasenloch ein. Stelle sicher, dass sich die gesamte Tupferspitze in deinem Nasenloch befindet (min. 2 cm tief). Führe den Tupfer nicht weiter ein, wenn du einen Widerstand spüren.

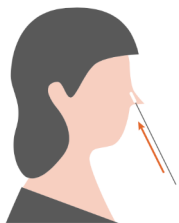


6 Rolle den Tupfer mindestens 5-mal gegen die Innenseiten Ihres Nasenlochs. Achte auf guten Kontakt zwischen dem Tupfer und der Innenseite deines Nasenlochs.

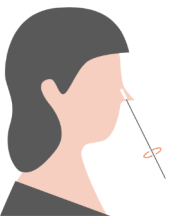

7 Entferne den Tupfer und führe ihn in dein rechtes Nasenloch ein. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.

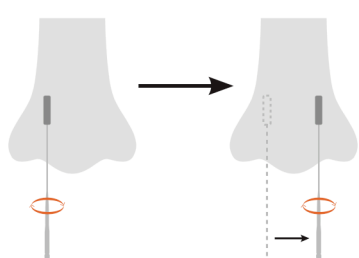

8 Entferne den Tupfer aus deinem Nasenloch und führe den Tupfer in das vorbereitete Röhrchen ein.

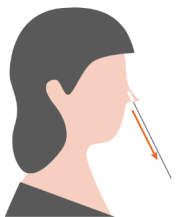

9 Mische gut, indem du den Tupfer mindestens 6-mal rollst und dabei den Kopf des Tupfers gegen den Boden und die Seiten des Röhrchens drückst.

