




1 Minute



10

Deine Lehrkraft startet jetzt den Timer. Lass den Tupfer für 1 Minute im Röhrchen.

11

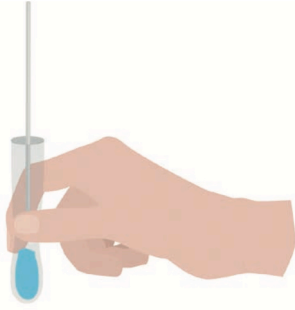

Drücke das Röhrchen mehrmals von außen zusammen. Versuche, so viel Probenlösung wie möglich aus dem Tupfer zu lösen.

12



Entferne den Tupfer und leg ihn auf seiner Verpackung am Tisch ab. Achte darauf, dass er nur dort abgelegt wird.

13



Schiebe die im Selbsttest-Set enthaltene Kappe, die dir deine Lehrkraft mit dem Teströhrchen ausgehändigt hat, in das Röhrchen und stelle sicher, dass sie fest sitzt.


13



Gib 4 Tropfen der Probenlösung in die Probenvertiefung der Testkassette, indem du das Röhrchen am hinteren Ende leicht zusammendrückst.

14

15 Minuten

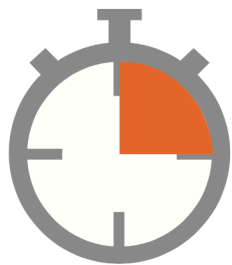

Setz nun deine Maske wieder auf.  
Die Fenster können nun wieder geschlossen werden.

Deine Lehrkraft starten nun den Timer erneut und du musst 15 Minuten warten.  
Es ist wichtig, die Ergebnisse nach 15 Minuten abzulesen.

15

Kontrolliere nun dein Testergebnis:

Positives Testergebnis

Negatives Testergebnis

Ungültiges Testergebnis

