
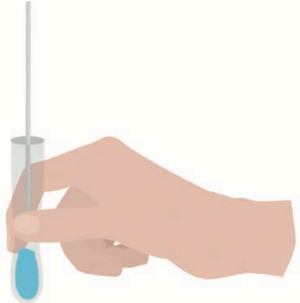





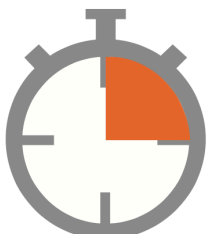
10 **1 Minute**  

 Startet jetzt den Timer. Lass den Tupfer für 1 Minute im Röhrchen.

11  

 Drücke das Röhrchen mehrmals von außen zusammen. Versuche, so viel Probenlösung wie möglich aus dem Tupfer zu lösen.

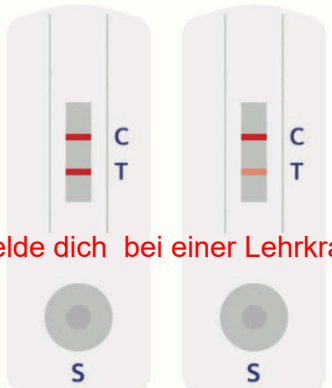
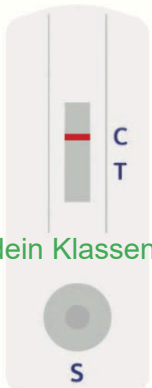

12  

 Entferne den Tupfer und leg ihn auf seiner Verpackung am Tisch ab. Achte darauf, dass er nur dort abgelegt wird.

13  

 Schiebe die im Selbsttest-Set enthaltene Kappe, die dir deine Lehrkraft mit dem Teströhrchen ausgehändigt hat, in das Röhrchen und stelle sicher, dass sie fest sitzt.

13  

 Gib 4 Tropfen der Probenlösung in die Probenvertiefung der Testkassette, indem du das Röhrchen am hinteren Ende leicht zusammendrückst.  
 4 Tropfen Probenlösung

14 **15 Minuten**  

 Setze nun deine Maske wieder auf.  
 Starte nun den Timer erneut: Du musst 15 Minuten warten. Es ist wichtig, die Ergebnisse nach 15 Minuten abzulesen.

15 Kontrolliere nun dein Testergebnis:

Positives Testergebnis	Negatives Testergebnis	Ungültiges Testergebnis
		
Melde dich bei einer Lehrkraft	Geh in dein Klassenzimmer	Melde dich bei einer Lehrkraft

16 Wirf den benutzten Tupfer und dein Teströhrchen in den Mülleimer und desinfiziere deinen Tisch mit dem bereitgestellten Desinfektionsspray.